

# Jednorazové ochranné rouška na ústa

## Popis:

Obdélníkové ochranné rouška

Velikost : 17,5 \* 9,5cm

Balení: 10 nebo 50 ks

Barva: Modrá

Složení: Mikrovlákno

Datum výroby: 2020-03-12

Datum spotřeby: 2 roky

## Použití:

1. Před nasazením roušky si umyjte ruce
2. Uchopte šňůrky oběma rukama a nasadte si roušku tak aby modrá část roušky směřovala směrem od obličeje a bílá část směrem k obličeji.
3. Priložte vrchní část roušky (s bílým páskem) směrem na nos a sevřete pásek podle vlastní velikosti, přizpůsobte rouško tváři. Rouška zcela zakrývá ústa.
4. Roušku je třeba vyměnit cca. Každých 8 hodin a není možné jej znovu použít.

## Informace:

1. Ochranné rouško je určeno k jednorázovému použití.
2. Nepoužívejte tuhle roušku vícekrát.
3. V případě že je rouška poškozena nepoužívejte ho.
4. Nepoužívejte rouška v případě že jeho spotřeba přesáhla 2 roky od jeho výroby, pokud neproudí vzduch, dýchání není plynulé, nebo v případě že se těžko dýchá.
5. V případě alergie na mikrovlákna rouško nepoužívejte.
6. Nedoporučuje se používat pro malé děti, kvůli jejich nižší vitalite.
7. Nepoužívejte roušku během spánku.